

## 【 RVPIIr に関する重要なお知らせ (2022.4.21)】

2021年12月以降に出荷したティルト式手押し型車椅子「RVポケットIIr」におきまして、使用開始後1ヵ月以内で、段差越えの際に後輪を持ち上げたときに、バックサポートを開いた状態で固定するロックピン(右図参照)が解除されてバックサポートが前に閉じてしまうという事例が数件報告されています。



お客様におかれましては、ご使用になる前にロックピンが不意に解除されないことをご確認くださいませようお願いします。右図のようにハンドルまたはバックサポートの横パイプを引き上げて後輪を少し浮かせてください。このときにロックピンが解除されなければ、安易にバックサポートが閉じることはありません。もしもロックピンが解除される様子が見られた場合には、一旦使用をとりやめ、ご購入された事業者様または弊社までお知らせください。状況を確認させていただいた後、必要に応じて交換部品を送らせていただきます。

2021年12月より以前にご購入の場合もご使用前の確認をお願いします。

また、ロックピンの付近には、潤滑スプレー、機械油等を絶対に注油しないでください。ロックピンの動きが過度に軽くなって固定が解除されやすくなります。誤って注油してしまった場合には、特別な有機溶剤等による洗浄が必要になることもありますのでご購入された事業者様にご相談ください。



現在、ロックピンが解除されてしまう場合の原因(潤滑剤以外)について製造元とともに調査中です。お客様ならびに販売事業者様には、ご心配、ご不安をおかけすることになり大変申し訳ありませんが、しばらくの間、適宜点検しながらご使用いただきますようお願いいたします。